



B/S[®]
SPANGE
Classic

Anleitung

Schritt für Schritt erklärt

Anleitung - B/S Spange Classic

Schritt für Schritt erklärt

Vor der Behandlung zu beachten

Die B/S Spange darf nicht auf kranke Nägel appliziert werden z.B. Pilzerkrankung, Schuppenflechte, Onycholyse etc.

- keine Fußbäder
- keine Desinfektionsmittel
- kein ölen oder cremen
- kein Nagellackentferner
- Nassfräsetechnik ausschalten!

Nach der Behandlung zu beachten

- Aufgeklebte B/S Spange mit Kleber versiegeln. Diese Versiegelung löst sich nicht durch Aceton oder Nagellackentferner.
- Erst nach der Versiegelung können Abschlussbehandlungen durchgeführt werden, wie z.B. cremen, ölen, lackieren, tamponieren oder Wundversorgung.

Videoanleitung

Falls Sie sich lieber ein Video anschauen möchten, können Sie gerne unsere Website besuchen:

www.bs-spange.de/schulungsvideos



Wie wird ein QR-Code gescannt?

Öffnen Sie die Kamera oder eine QR-Code Scanner App auf dem Smartphone. Halten Sie die Kamera über den QR-Code. Es erscheint ein Link, diesen tippen Sie bitte an und nun können Sie das passende Schulungsvideo auswählen.

Wichtige Hinweise neben der Anwendung

- Die Chargennummer des Klebers befindet sich auf dem Deckel und ist das Verfallsdatum. Bsp.: Chrg.-Nr. 1021, Verfallsdatum: Oktober 2021.
- Den Pinsel des Klebers nicht am Flaschenhalsrand abstreifen.
Es kommt sonst zu Verklebungen!
Somit haben Sie auch die perfekte Menge an Kleber.
- Kleber und Aktivator dürfen nicht in Kontakt kommen, die Folgen sind:

Die Haltbarkeit des Klebers wird verkürzt

Der Kleber zieht Fäden

Der Flascheninhalt härtet aus

- Kleber einfrieren! Die Haltbarkeit des Klebers verlängert sich um die Zeit in der dieser sich im Gefrierfach befindet, aber **ACHTUNG!** Der Kleber muss bei Zimmertemp. angewendet werden, ca. 21–24 Grad.
- Aktivator testen: Mit dem Stift über ein Blatt Papier streichen, wenn dieser Flüssigkeit abgibt, funktioniert er noch.
Wichtig: Aktivator immer fest verschließen!
- Ist der Zug der Spange nach der Verklebung zu stark, einfach die Spange gefühlvoll an den beiden Enden dünner fräsen.
Wenn notwendig schleifen Sie die gesamte Spange dünner.



1. Nagel vorbereiten

Wichtig für die feste und sichere Anbringung der B/S Spange ist das Abschleifen und Anrauen der Nagelplatte. Kräftige Nägel sind dünner zu schleifen.

Die Nageloberfläche wird mit einem Diamant- oder Korundfräser aufgeraut.



2. Spangengröße ermitteln

Die B/S Spange muss so passen, dass sie die sichtbare Nagelplatte überspannt, jedoch nicht übersteht und möglichst nicht zu kurz ist. Ausgemessen und geklebt wird die B/S Spange mit der rauen Seite auf den Nagel.



3. Das Entfetten

Nach Bestimmen der B/S Spangengröße **entfetten Sie die komplette Nageloberfläche mit einem Tropfen B/S Reiniger** auf einem Tupfer.

Danach trocknen Sie den Nagel mit dem trockenen Teil des Tupfers ab.

Die Platzierung

Die optimale Wirkung der B/S Spange erreichen Sie, wenn die B/S Spange 1–2 mm rückwärtig des schmerzverursachenden Bereiches verklebt wird.



4. B/S Aktivator auftragen


Streichen Sie **nur die seitlichen Nagelränder** mit dem B/S Aktivator-Stift ein.

Der Aktivator ist zum sicheren und schnellen Abbinden des Klebers notwendig.



5. B/S Spange vorbereiten

Schleifen Sie mit einem Diamant- oder Korundfräser die Enden (ca. 2–4 mm) der B/S Spange auf der rauhen Seite etwas dünner. Dadurch lassen sich die Enden leichter an den Nagel andrücken und stehen nicht ab.

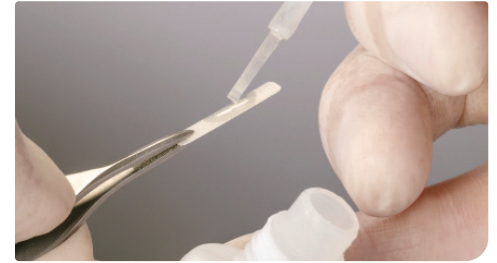

6. B/S Kleber auftragen

Nehmen Sie die ausgewählte B/S Spange wie abgebildet und tragen Sie in der Mitte einen vollen Tropfen B/S Basic Kleber auf. Beachten Sie die Größe der B/S Spange!

Möglichst nur mit der Flüssigkeit die Spange berühren. **Den Kleber nicht auf der Spange verteilen!**

Vermeiden Sie Hautkontakt und decken Sie Entzündungen und Wunden mit einer Salbe ab.

Der Klebstoff darf nicht auf Wunden gelangen.

Mehr zur **Alternativmethode** finden Sie auf unserer Webseite www.bs-spange.de.



6.1. Die korrekte Mittenfixierung

Legen Sie die B/S Spange 1 - 2 Millimeter rückwärtig der schmerzverursachenden Stelle an und drücken Sie diese **leicht für ca. 10 Sekunden** mittig auf den Nagel, ohne dabei zu verrutschen.

Unser Tipp:

Bewahren Sie Ruhe! Während dem Applizieren möglichst nicht mit der Pinzette verrutschen und freihändiges Arbeiten unterlassen. Stützen Sie sich am Fuß des Patienten ab.




6.2. Die Fixierung rechts und links

Nun drücken Sie die B/S Spange, mit dem abrutschsicheren und stumpfen Teil des Applikators, auf die rechte seitliche Nagelplatte – für ca. 10 Sekunden.

Achtung:

Die Enden der B/S Spange müssen am Nagel anliegen und dürfen nicht abstehen.

Den Ablauf auf der linken Seite wiederholen.

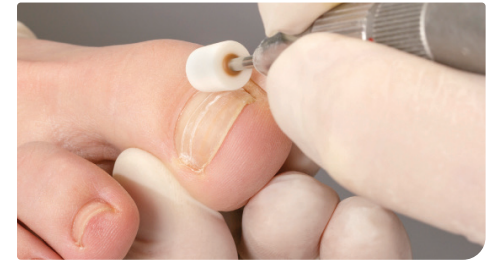

7. Individuell Zugkräfte anpassen

Verspürt Ihr Patient nach der Verklebung der B/S Spange einen **Zugschmerz oder ein unangenehmes Ziehen** so ist die Spannung zu stark.

Die angeklebte B/S Spange müssen Sie in diesem Fall, in den Endbereichen, oder wenn dies nicht ausreichend, insgesamt gefühlvoll dünner schleifen.

Ihr Vorteil:

Die Korrektur der B/S Spange erfolgt auf dem Nagel!

Abstehende Spangenenenden können Sie bei weniger als 1 mm wegschleifen.



8. Nagel mit B/S Reiniger säubern

Vor der Versiegelung bitte den Aktivator entfernen, **ein Tropfen B/S Reiniger** auf einen Tupfer geben und über die Nagelplatte wischen. Somit wird der zuvor aufgetragene Aktivator entfernt.

Achtung:

Der Aktivator darf nicht mit dem Kleber in Verbindung kommen, da der Kleber sonst austrocknet.



9. Die abschließende Versiegelung

Um eine besonders feste und wasserresistente Verankerung zu erzielen, versiegeln Sie mit dem B/S Kleber den Nagel mit der bereits aufgeklebten B/S Spange.

Diese Versiegelung löst sich nicht mit Aceton oder Nagellackentferner!


Verteilen Sie den B/S Kleber wie einen Lack über die gesamte Nageloberfläche.



10. Die Nachversorgung

Nach dem Abtrocknen der Versiegelung (ca. 5 Minuten) kann die übliche Nagelversorgung durchgeführt werden:

- Tamponieren des Nagelfalzes
- Anlegen von Salbenverbänden
- Lackieren der Nägel
- Fußbäder
- Cremen und ölen

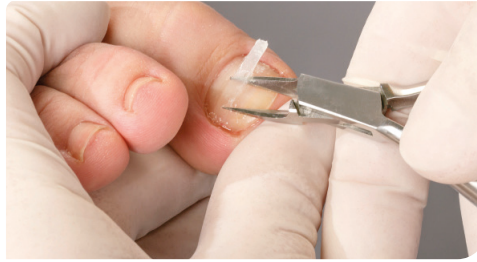

11. Das Ablösen der B/S Spange

Benutzen Sie am Besten eine gerade Nagelzange zum Ablösen der B/S Spange. Setzen Sie die Zange dazu an einem Ende „zwischen Spange und Nagel“ an.

So können Sie die Verklebung einfach sprengen und die B/S Spange vorsichtig vom Nagel lösen (siehe Bilder oben).

Korrekturoptimierung

Die beste Korrektur eines eingewachsenen Nagels erreicht man, wenn **alle 4 Wochen eine neue B/S Spange** appliziert wird.

Sie kann aber auch länger auf dem Nagel belassen werden, bis sie von selbst abgeht. Jedoch hat sie **nach 4 Wochen nur noch geringe, bis keine Hebekraft** mehr.

Falls notwendig und zwischen Nagelwurzel und erster B/S Spange genug Platz ist, kann nach einem Monat oder später eine zweite B/S Spange in den Zwischenraum geklebt werden.


Achtung:


Beachten Sie die Hebekräfte bei zwei B/S Spangen!



Absolut Original,

seit über 35 Jahren.

 berndstolzgmbh

 bsspange

Bernd Stolz GmbH

Fuggerstraße 36 a
D-92224 Amberg

+49 96 21 / 22 1 88
info@bs-spange.de

www.bs-spange.de
www.shop.bs-spange.de